

採血管種及び各種容器一覧

容器記号	検査内容	内容物	採取量	栓色	ラベルの種類	備考	採取容器とラベルの使いわけ
A	生化学・免疫血清検査 (緊急検査を含む) (分離剤入り)		6ml	茶色	バーコードラベル		
B	透析検体用 (分離剤入り)	ヘパリン中和剤+高速凝固促進剤	6ml	黄色	バーコードラベル	転倒混和	
C	血糖・ヘモグロビン A1c	フッ化ナトリウム+ヘパリンナトリウム+EDTA-2Na	2ml	灰色	バーコードラベル	転倒混和	
D	血液一般検査	EDTA-2K	2ml	薄紫色	バーコードラベル	転倒混和	
E	脳性 Na 利尿ペプチド (BNP)	EDTA-2Na	5ml	薄紫色	普通ラベル	転倒混和	
F	アンモニア (氷冷保存)	ヘパリンナトリウム	5ml	緑色	普通ラベル	転倒混和	
G	凝固検査	3.2% クエン酸ナトリウム	1.8ml	黒色	バーコードラベル	転倒混和	
H	輸血関連検査 (血液型 交差適合試験 直接クームス 間接クームス 不規則抗体)	EDTA-2Na	5ml	黄色	バーコードラベル	転倒混和	
I	ガス分析 (氷冷保存)	ヘパリンリチウム	2.0ml		普通ラベル	回転混和	
J	尿検査 (生化学・免疫血清・一般)		10ml	半透明色	バーコードラベル		

採血管種及び各種容器一覧

容器形態	容器形態	容器形態
K 喀痰容器 用途：喀痰の採取 	O 採便容器 用途：糞便の採取  (スプーン付)	S スライド 用途：鼻汁喀痰中好酸球検査 擦過物の標本 
L1 スワブキット1号 用途：下痢便の採取 内容：キャリーブリア培地 	P キャピジェクトII 用途：ベビー・小児用微量採血管 種類：生化学検査 (黄), 血液一般 (紫) 	U 滅菌シャーレ 用途：その他 
L2 スワブキット2号 用途：耳鼻咽喉からの採取 内容：変法アミーズ培地 	Q 嫌気ポーターII 用途：嫌気性菌検出を目的とする時 (血液培養を除く) 内容：寒天培地, CO ₂ ガス充填 	V 滅菌ポリスピッツ 用途：尿, 髄液, 膿汁など液状検体の採取 
L3 スワブキット3号 用途：鼻腔・咽頭・膈・膈分泌物からの採取 内容：変法アミーズ培地 	R 血液培養ボトル 用途：血液培養  (1日目) (2日目) (好気用) (嫌気用) (小児用)	W 呼気採取バッグ 用途：ヘリコバクター・ピロリ検出検査用 